

たすけ

起立介助チェア「立介」 お手入れ方法

[品番: CW01KK-MX]

このたびは、起立介助チェア「立介」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当製品は使用経過に伴い、座の昇降時に金属どうしが擦れるような異音が発生する場合がございます。
その際は、お手数ですが下記要領にてお手入れをお願い致します。
尚、異常が無い場合でも、可動部への定期的なメンテナンスをお勧めしております。



下写真を参考に、該当箇所A・B に潤滑剤(※)を塗布してください。
塗布後、座面を何度か上下させ、潤滑剤をよくなじませてください。



※ 潤滑剤は高粘度タイプのものをご使用下さい。




防サビ剤などの洗浄効果がある潤滑剤を使用すると、油分をなくす働きにより、症状が悪化します。潤滑剤は高粘度タイプのものを必ずご使用下さい。

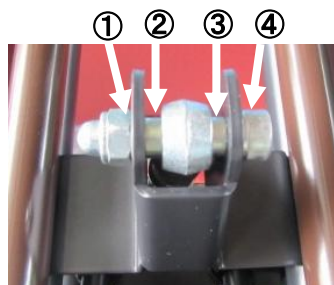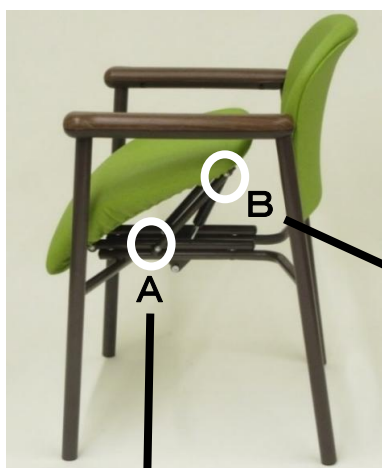

A部

- ①ナットと板の隙間
- ②金属スペーサー部
- ③金属スペーサー部
- ④ボルトと板の隙間

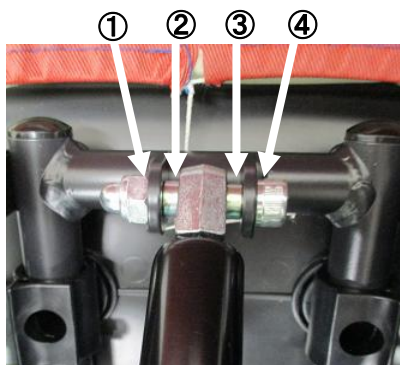

B部

- ①ナットと板の隙間
- ②金属スペーサー部
- ③金属スペーサー部
- ④ボルトと板の隙間



潤滑剤が飛び散らない様、
ご不要な布等をあてながら
吹き付けを行って下さい。

ご質問、ご不明な点がございましたら下記連絡先までお問い合わせください。

株式会社 **SANKEI**

〒513-0017

三重県鈴鹿市上野町字助町48番地 TEL 059-387-0465 FAX 059-378-3719 MAIL info@isu-sankei.co.jp